

# DESCOCEPT AF

## alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

- ✓ dermatologisch getestet
- ✓ aldehydfrei
- ✓ phenolfrei

- aldehydfreies Schnelldesinfektionsmittel mit frischem Duft
- umfassende Virenwirksamkeit inkl. Noro-Viren
- gute Hautverträglichkeit

als Schaum  
applizierbar



CE 0482



### PRÄPARATETYP

**DESCOCEPT AF** ist eine gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol und quartären Ammoniumverbindungen.

**DESCOCEPT AF** hat einen angenehmen, **frischen Duft** und eine **gute Hautverträglichkeit**. Auf Grund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen nach Anwendung von **DESCOCEPT AF** nahezu ausgeschlossen.

Umfangreiche Wirksamkeit gegenüber Viren- auch wirksam gegen Noro-Viren.

Als Flächendesinfektionsmittel in allen Bereichen, wo eine schnelle Desinfektion gebraucht wird. Geeignet für:

- ärztliche und zahnärztliche Praxen (z.B. Behandlungstühle, auch Hand- und Winkelstücke)
- Augenärztliche Praxen und Optiker zur Vorbeugung von viralen Infektionen
- Schnelldesinfektion von OP-Inventar und Operationstischen zwischen den Operationen
- Bettgestelle, Matratzen, Decken und Kissen
- Transportmittel wie Krankentransportfahrzeuge, Notarztwagen, Müllentsorgungsfahrzeuge und Transportkörbe
- allgemeines Mobiliar wie Untersuchungsliegen, Verbandswagen, Badewannen und Toilettensitze
- Bekleidung wie Kittel, OP-Schuhe, Gummischürzen und Wäsche

**DESCOCEPT AF** erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit bezüglich der Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen in humanmedizinischen Einrichtungen gem. TRGS 525/406.

### ANWENDUNGSBEREICHE

**Gem. MPG:** Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten.

**Gem. Biozidrichtlinie:** Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet.

### ANWENDUNG

Flächen und Gegenstände mit **DESCOCEPT AF** aus mindestens 30 cm Abstand bis zur vollen Benetzung besprühen, nach Ablauf der Einwirkzeit mit Einmaltuch nachwischen.

Zur Vermeidung von starker Raumluftbelastung durch Alkohol **DESCOCEPT AF** in ein Einmaltuch sprühen und die Flächen bei entsprechender Benetzung abwischen.

**DESCOCEPT AF** hat praktisch keine Belagsbildung zur Folge.

### WIRKUNGSSPEKTRUM

**DESCOCEPT AF** wirkt:

- bakterizid inkl. MRSA
- tuberkulozid
- fungizid (C.albicans)/levurozid
- virusinaktivierend inkl. HBV/HIV, HCV, BVDV, Rota-, Adeno-, Vaccinia-/Influenza-/Grippe-/Noro-Viren

### EINWIRKZEIT

<b>bakterizid inkl. MRSA, fungizid (C. albicans)/ levurozid</b>	
gem. DGHM/ÖGHMP/VAH	konz. 1 Min.*
(*gelistet in der 5-Min.-Spalte der VAH-Liste)	
Tuberkulose-Bakterien (M. terrae)	konz. 1 Min.
Aspergillus niger	konz. 30 Min.

<b>wirksam gegen alle behüllten Viren wie Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Influenza-/Grippe-Viren</b>	
(begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung)	konz. 30 Sek.
Rota-/Adeno-Viren	konz. 1 Min.
Noro-Viren (MNV)	konz. 5 Min.



# **DESCOCEPT AF**

## alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

### ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g Lösung sind als wirksame Bestandteile enthalten:

42,0 g Ethanol  
0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

### CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

**Aussehen:** klare, farblose Lösung  
**pH-Wert:** 7,0 +/- 1,0  
**Flammpunkt:** 25 °C

### LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
500 ml Flasche	10 x 500 ml	0792277	00-311-005
1 L Flasche	10 x 1 L	0792283	00-311-010
5 L Kanister	3 x 5 L	0792308	00-311-050
10 L Kanister	1 x 10 L	0792314	00-311-100

### DOSIERHILFEN

Schaumprühkopf für 1-Liter-Flasche, Sprühkopf für 500-ml und 1-Liter-Flasche, Kanisterumfüllhahn, Kanisterschlüssel.

### BESONDERE HINWEISE

Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten! Nicht rauchen. Von Zündquellen fernhalten! Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Ausbringung max. 50 ml pro m<sup>2</sup>. Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100 ml pro m<sup>2</sup> Raumgrundfläche betragen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

### GUTACHTEN

**Dr. Pitten**, Hygieniker, Gießen:  
Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtlinien.  
**Dr. Suchomel**, Hygienikerin, Wien:  
Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtlinien.  
**Dr. Steinmann**, Virologe, Bremen:  
Gutachten zur Wirksamkeit gegenüber: Adeno-, Vakzinia-Viren, BVDV.  
**Prof. Dr. Werner**, Hygieniker, Schwerin:  
Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit.  
Gutachten zur Wirksamkeit gegen Noro-Viren (MNV) gem. EN 14476.  
**Dr. Voss**, Dermatest, Münster:  
Fachärztliches, dermatologisches Gutachten (Epikutantest).  
**Konrad Hornschuch AG, Weißbach:**  
Freigabe zum Einsatz von **DESCOCEPT AF** mit Skai® Polstermaterialien.  
**Bergé & Co. GmbH, Versmold:**  
Freigabe zum Einsatz von **DESCOCEPT AF** mit MM-Desinfektionsmatten.  
**Dr. Brill**, Hygieniker, Hamburg:  
Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **DESCOCEPT AF** im **DESCO WIPES SYSTEM**; Desinfizierende Wirkung des Vliesstoffes **DESCO WIPES DT** in Kombination mit **DESCOCEPT AF**.  
Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **DESCOCEPT AF** im **ECO WIPES SYSTEM**.

### PRODUKTSTATUS/LISTUNGEN

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der DGHM/VAH.  
Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der ÖGHMP.  
Gelistet in der IHO-Viruzidie-Liste ([www.iho-viruzidie-liste.de](http://www.iho-viruzidie-liste.de)).  
Registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: baua Reg.-Nr.: N - 20338.  
Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

### UMWELTINFORMATION

Die Produkte der Dr. Schumacher GmbH werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt. Das Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS.

