

Meliseptol® rapid

Gezielte Schnelldesinfektion



Eigenschaften

Meliseptol® rapid

- gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel zum Versprühen oder Wischen
- vollkommen aldehydfrei und frei von Alkylaminen
- für Oberflächen von Medizinprodukten, wie z. B. Behandlungstühle, Arbeitsflächen und OP-Ausstattungen
- umfassendes Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid und fungizid (inkl. Schimmelpilze). Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)¹⁾ und viruzid¹⁾ (inkl. NORO-Viren)
- Einwirkzeit nur 1 Minute (gemäß DGHM²⁾/VAH³⁾ und begrenzt viruzid¹⁾)
Einwirkzeit Viruzidie¹⁾: 10 Minuten
- DGHM²⁾/VAH³⁾-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste⁴⁾

Meliseptol® rapid ... schnell wirksam

Auf einen Blick

- anwendungsfreundlich, zum Sprühen oder Wischen
- besonders schnell wirksam: 1 Min. DGHM/ VAH bzw. TbB in 30 Sek.
- umfassendes Wirkungsspektrum
- frischer Geruch
- aldehydfrei
- Listung: DGHM-/ VAH-Liste und in der IHO-Viruzidie-Liste

Hinweise zur Anwendung

Meliseptol® rapid aus den Dosierflaschen auf ein Einmal-tuch gießen und die Flächen vollständig benetzen. Oder die zu behandelnde Fläche bis zur vollständigen Benetzung mittels der Sprühflaschen einsprühen und mit einem Tuch verreiben – 1 Minute wirken lassen. Die Flächen dürfen nicht trockengerieben werden. Werden elektrische Geräte desinfiziert, müssen Sie diese vorher ausschalten (Netzstecker ziehen) und abkühlen lassen. Ist dies nicht möglich, ist sicherzustellen, dass während der Desinfektion keine Schaltvorgänge ablaufen. Alkoholempfindliche Materialien (z. B. Acrylglas) vorher auf ihre Beständigkeit gegenüber Meliseptol® rapid prüfen.

Wirkungsspektrum / Einwirkzeiten (EZ)

Einsatzgebiet	EZ
Flächendesinfektion zur Hospitalismusprophylaxe und in der allgemeinen Praxis (gemäß DGHM/ VAH) begrenzt viruzid (inkl. HBV/HCV/HIV)	1 Min.*
viruzid	10 Min.
Adeno- und Rotaviren	1 Min.
Vacciniaviren	30 Sek.
TbB	30 Sek.
Polioviren	10 Min.
Polyomaviren	5 Min.
NORO-Viren**	2 Min.

* Der kürzest mögliche Listungswert beim VAH beträgt 5 Min.

** Surrogatvirus FCV

Physikalisch-chemische Daten

Aussehen: klare Flüssigkeit
Geruch: alkoholartig
pH-Wert: ca. 7,0
Flammpunkt: +31 °C
Dichte: 0,91 g/ml bei 20 °C

viruzid

Lieferform	REF	PZN
250 ml-Sprühflasche	18564	1264592
250 ml-Dosierflasche	18566	1264534
1000 ml-Handsprühflasche	18565	1264586
1000 ml-Flasche	19108	0241413
5 Liter-Kanister	18567	1264600
Sprühkopf für 1000 ml-Flasche	6510094	2182034
Auslaufhahn 5 Liter-Kanister	3908216	3393968



Meliseptol® rapid – Auszug aus den Produktinformationen

100 g Lösung enthalten: 1-Propanol 50,0 g, Didecyldimethylammoniumchlorid 0,075 g sowie Duft- und Hilfsstoffe.

Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: < 5 % nichtionische Tenside, Parfum

Angaben gemäß Gefahrstoffverordnung:

Entzündlich. Nicht in die offene Flamme sprühen. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fern halten. – Nicht rauchen! Gefahr ernster Augenschäden (nach Augenkontakt sorgfältig mit viel Wasser ausspülen). Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

31 °C Flammpunkt nach DIN 51755. Ausbringung max. 50 ml/m².

1) gem. RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01-2004

2) DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie

3) VAH = Verbund für Angewandte Hygiene

4) www.iho-viruzidie-liste.de